

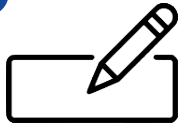
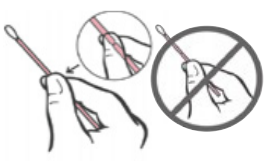
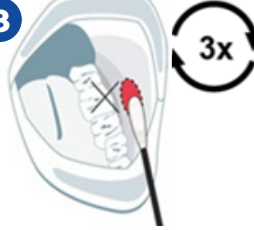
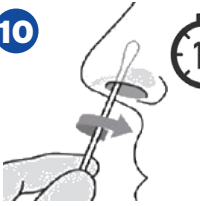
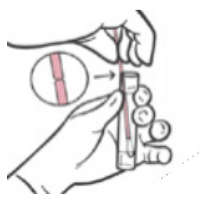
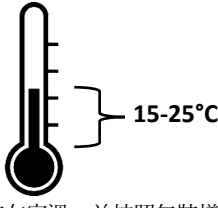
A

樣本收集和處理說明

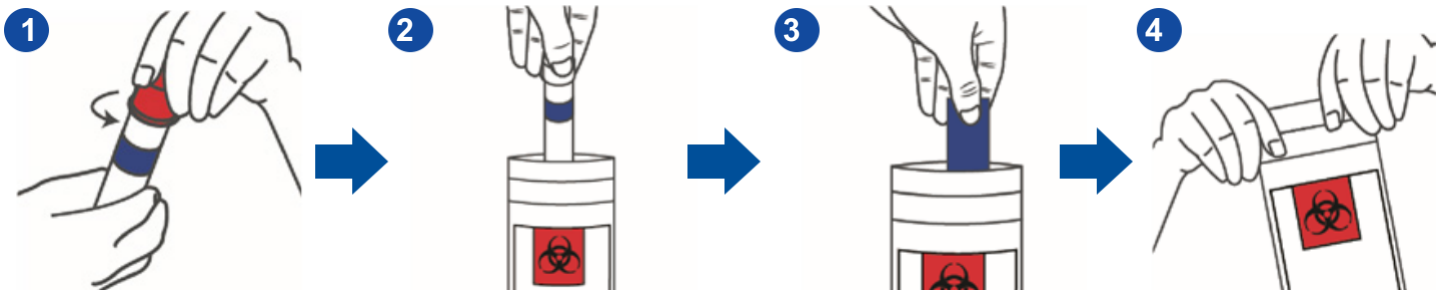
頰側 / 雙側前鼻採集

以下說明書旨在幫助您收集雙側鼻樣本以進行COVID-19測試。首先，請仔細閱讀說明，然後按照每個步驟進行操作，以確保獲得準確的結果。注意：您必須年滿1歲，才能進行自我收集的雙側鼻樣本。

你或需要使用鏡子協助收集樣本。

- 
用肥皂和清水徹底洗淨雙手。
- 
獲取雙側前鼻收集測試套件。確認收集管中盛有液體，並且液體沒有明顯混濁。
- 
在標籤上寫下您的全名，出生日期以及採集的日期和時間，然後將其粘貼到試管上。
- 
旋開試管的蓋子，將其右側朝上放在平坦的表面或試劑盒的指定範圍中。不要濺出試管中的內容物。
- 
抓住棉籤包裝紙的兩端，然後慢慢將包裝紙剝下，露出棉籤手柄。不要拆開完全拭子。
- 
從包裝中取出棉籤並抓住棉籤，以捏住刻痕線。這樣可以防止棉籤在使用過程中意外斷裂。
- 
為避免污染，在收集之前，請確保拭子不與任何表面或您的手接觸。**如果被污染，請使用新的試劑盒。**
重要提示：請勿在收集之前預先潤濕或預先濕拭。
- 
將拭子插入一側臉頰和下牙齦之間，旋轉拭子3次以確保其濕潤，並在另一邊重複一次。
- 
將拭子插入鼻孔之一內約1厘米（0.5寸）。將拭子在鼻孔內表面牢固地旋轉15秒鐘。
- 
使用相同的拭子，另一個鼻孔重複收集樣本。再將棉籤旋轉15秒鐘。
- 
立即將棉籤放入運輸管中，使刻痕線與運輸管的上邊緣齊平。
- 
小心地折斷軸，讓棉籤掉落到通孔底部的液體中。
- 
在頂部部分丟棄到普通垃圾中。
- 
牢固地擰上管蓋。**重要：**出於安全和質量原因，將拒絕接受洩漏的標本。
- 
用肥皂和清水徹底洗淨雙手。
- 
將試管保存在室溫，並按照包裝樣本說明書包裝樣本。

包裝樣本說明書

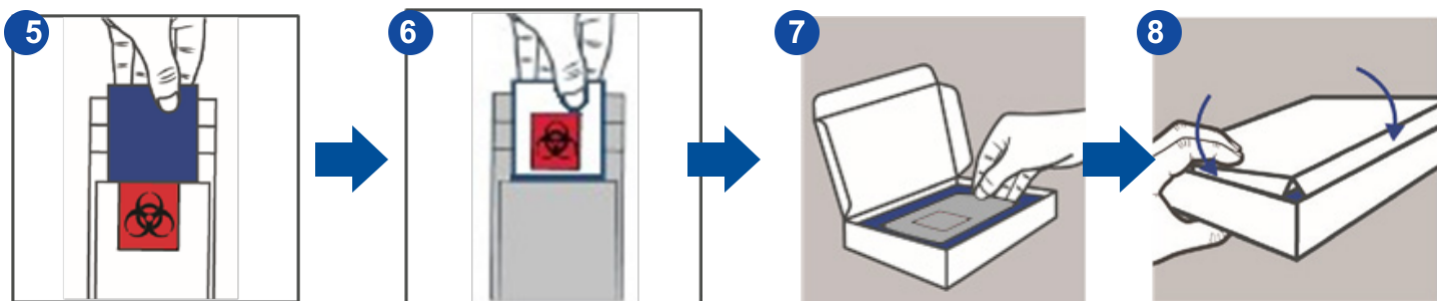


1 檢查確保樣本試管上的蓋子完全扭緊。

2 將已密封的樣本放進貼上生物化學標註冊的密實袋內。

3 將吸水墊放入已放置樣本試管的密實袋內。

4 植入後，將密實袋緊閉，並確保已密封。

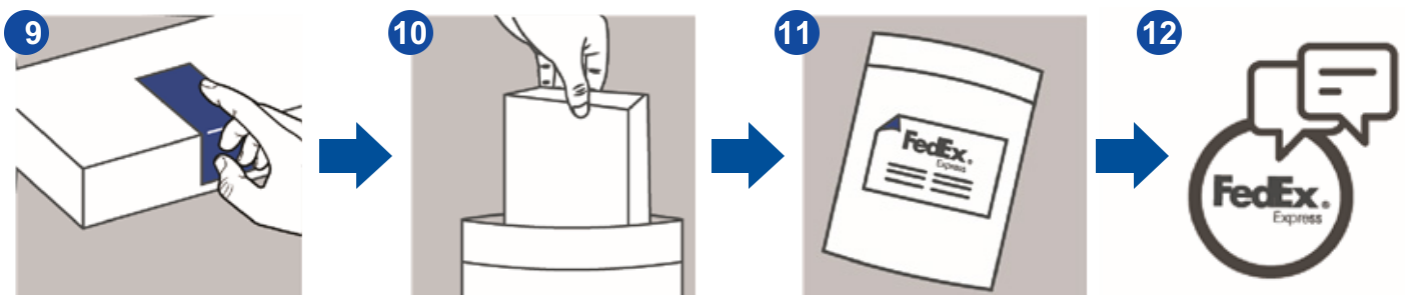


5 將你的訂單對摺，並放置密實袋的外袋。

6 將密實袋放入鋁製包裹並密封。

7 將鋁製包裹放入盒內。

8 關上盒的蓋子。



9 在盒子開合邊緣貼上防篡改的貼紙。

10 將整個盒放入白色袋落並密封。

11 將聯邦快遞郵遞單貼在白色袋上。

12 致電 1-800-GoFedEx 聯繫聯邦快遞收取包裹。注意：此家庭測試包並不適用於在投遞箱或 FedEx (FASC) 點投寄。