

A

Instructions pour le prélèvement et la manipulation des échantillons


PRÉLÈVEMENT BUCCO-NASAL ANTÉRIEUR BILATÉRAL

Les instructions de prélèvement vous aideront à prélever votre échantillon bucco-nasal bilatéral pour le test de la COVID-19.


Veuillez d'abord lire attentivement les instructions, puis suivre chaque étape pour assurer l'exactitude des résultats.

REMARQUE : Vous devez être âgé de 16 ans ou plus pour effectuer un auto-prélèvement bucco-nasal bilatéral.


L'utilisation d'un miroir peut aider au prélèvement.

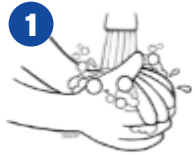

1 Lavez-vous les mains à l'eau et au savon et séchez soigneusement.

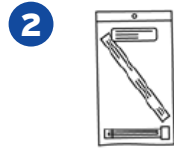


2 Obtenez le kit de prélèvement bucco-nasal antérieur bilatéral. Vérifiez que le tube de prélèvement contient du liquide et que le liquide n'est pas trouble à l'œil nu.

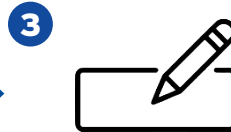


3 Sur l'étiquette, inscrivez votre nom complet, votre date de naissance et la date et l'heure du prélèvement, puis apposez sur le tube.



4 Dévissez le bouchon du tube en le plaçant tourné vers le haut sur une surface plane ou dans la partie désignée du kit.

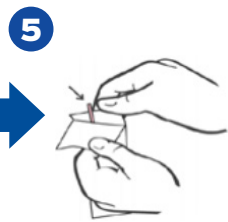


5 Saisissez les deux extrémités de l'emballage et décollez lentement pour exposer la tige de l'écouvillon. Ne décollez pas complètement l'écouvillon.

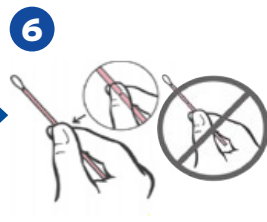

6 Retirez l'écouvillon de l'emballage et saisissez de manière à pincer la ligne de séparation. Cela empêchera la rupture accidentelle de l'écouvillon lors du prélèvement.




7 Pour éviter toute contamination, assurez-vous que l'écouvillon n'entre pas en contact avec votre main ou toute surface avant le prélèvement.
En cas de contamination, utilisez un nouveau kit.
Important : En aucun cas, NE préhumectez ou pré-humidifiez l'écouvillon avant le prélèvement.

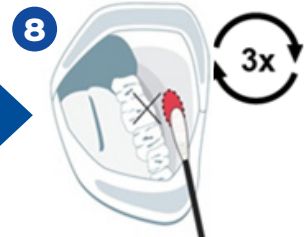


8 Insérez l'écouvillon entre la joue et la gencive inférieure d'un côté, puis faites pivoter l'écouvillon 3 fois pour vous assurer qu'il est bien humidifié. Répétez le processus de l'autre côté.




9 Insérez l'écouvillon à environ 1 cm (0,5 po) à l'intérieur de la narine. Faites tourner **fermement** l'écouvillon autour des surfaces internes de la narine pendant 15 secondes.

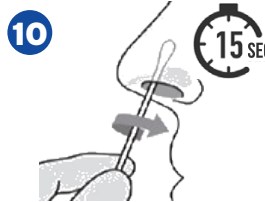

10 Répétez pour l'autre narine en utilisant le même écouvillon. Faites tourner l'écouvillon pendant 15 secondes supplémentaires.

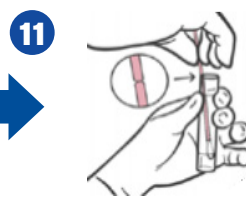


11 Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube de transport de sorte que la ligne de séparation soit au niveau du bord supérieur du tube.

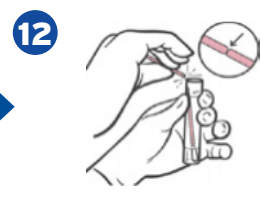

12 Cassez délicatement la tige et laissez l'écouvillon tomber au fond du flacon dans le liquide.




13 Jetez la partie supérieure de la tige dans une poubelle ordinaire.

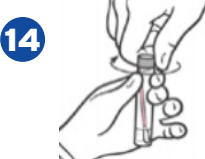

14 Vissez solidement le bouchon du tube.
Important : Les échantillons présentant des fuites seront rejetés pour des raisons de sécurité et de qualité.



15 Lavez-vous les mains à l'eau et au savon et séchez soigneusement.

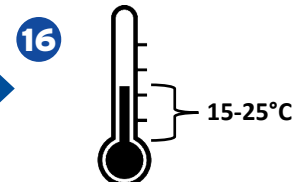


16 Conservez le tube à la température ambiante et suivez les instructions pour emballer votre échantillon.

Pour des demandes de renseignements, visitez [LifeLabs.com/COVIDkit](https://www.lifelabs.com/COVIDkit)

LifeLabs®

B


Instructions pour emballer votre échantillon

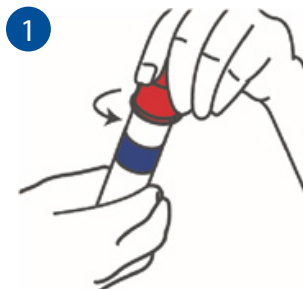

1 Vérifiez que le bouchon du tube est bien vissé.




2 Placez le tube d'échantillon solidement fermé dans le sac pour matières infectieuses contenu dans le kit.

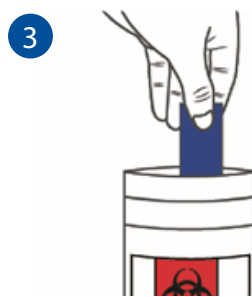

3 Placez le tampon absorbant dans le sac avec le tube d'échantillon.



4 Quand tout est placé dans le sac, scellez soigneusement le sac pour matières infectieuses et assurez-vous qu'il est complètement scellé.

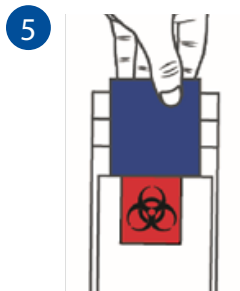


5 Pliez la réquisition et placez-la dans la poche extérieure du sac pour matières infectieuses.




6 Placez le sac pour matières infectieuses à l'intérieur de la poche en aluminium et scellez.




7 Placez la poche en aluminium pour matières infectieuses dans la boîte de kit.

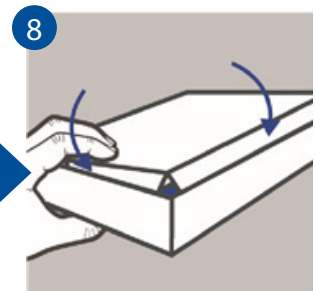

8 Fermez les rabats de la boîte.

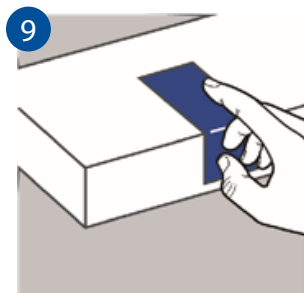

9 Apposez le sceau inviolable sur le bord inférieur avant de la boîte.

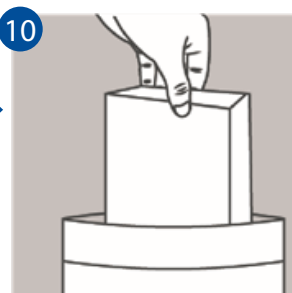

10 Placez toute la boîte de kit dans le sac blanc en polyéthylène et scellez.



11 Placez toute la boîte de kit dans le sac blanc en polyéthylène et scellez.



12 Communiquez avec FedEx au 1-800-463-3339 pour planifier le ramassage immédiatement après l'emballage de votre échantillon. Remarque : Votre kit de prélèvement à domicile ne peut pas être déposé dans une boîte de dépôt ou dans un centre d'expédition FedEx. Pour d'autres options, visitez [LifeLabs.com/COVIDkit](https://www.lifelabs.com/COVIDkit)