

A

样本采集和处理说明

颊侧 双侧前鼻采集

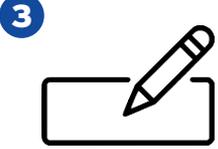
以下采集说明旨在帮助您为2019冠状病毒病测试采集双侧鼻腔样本。首先仔细阅读说明，然后按照每个步骤进行操作，以确保结果准确。

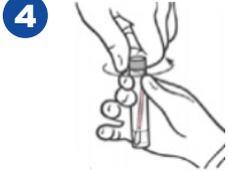
注意：您必须年满16岁或以上才能自行采集双侧鼻腔样本。

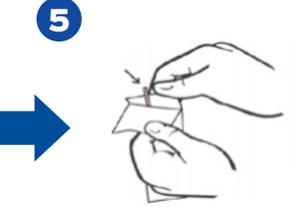
使用镜子可能有助于您的样本采集。

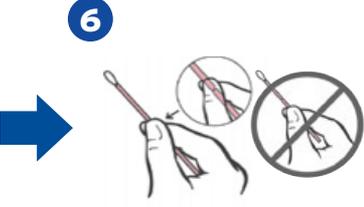
- 

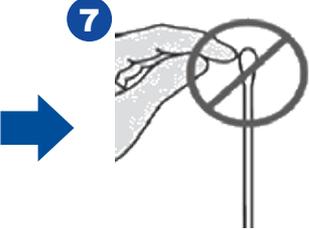
1 用肥皂和水清洗双手，并完全擦干。
- 

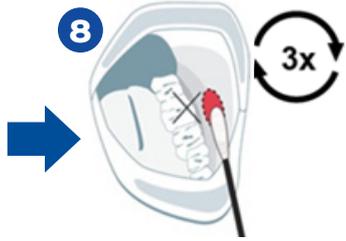
2 获取双侧前鼻腔采集工具。确认收集试管中含有液体，并且液体没有明显的混浊。
- 

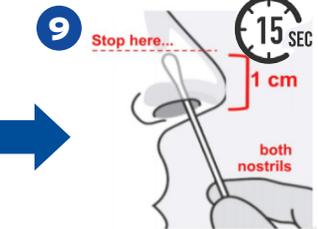
3 在标签上写上您的全名、出生日期，以及采集的日期和时间，然后将其贴在试管上。
- 

4 拧开试管的盖子，将其朝上放在平坦的台面上，或放在测试套装的指定部分。切勿洒出试管里的液体。
- 

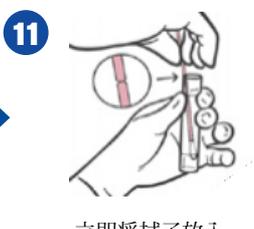
5 抓住拭子包装的两端，慢慢向下撕开包装。露出拭子柄。不要完全拆开拭子的包装。
- 

6 从包装中取出拭子，捏住拭子分界线处。这将防止采集过程中拭子的意外断裂。
- 

7 为避免污染，确保拭子在采集前不与您的手或其他任何表面接触。
如不慎污染，请使用新套装。重要事项：切勿预先湿润拭子或在采集前将拭子打湿。
- 

8 将拭子插入一侧脸颊和下牙龈之间，旋转拭子3次以确保其湿润，并在另一边重复一次。
- 

9 **Stop here...** 15 SEC 1 cm both nostrils
将拭子插入一侧鼻孔内约1厘米（0.5英寸）。将拭子在鼻孔内侧用力旋转擦拭约15秒。
- 

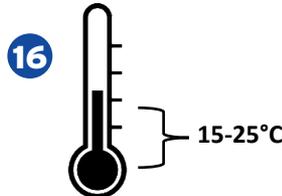
10 15 SECS
使用同一个拭子，在另一侧鼻孔内重复此动作。将拭子再旋转擦拭约15秒。
- 

11 立即将拭子放入运输试管中，并确保拭子分界线与运输试管的上边缘持平。
- 

12 小心地沿线将拭子柄折断，让拭子掉入试管的底部，浸入液体中。
- 

13 将折断拭子柄的顶端部分丢弃于普通垃圾桶中。
- 

14 将试管盖子牢固地拧紧。
重要事项：出于安全和质量原因，泄漏的样本将会被拒收。
- 

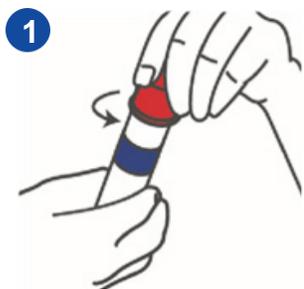
15 用肥皂和水清洗双手，并完全擦干。
- 

16 15-25°C
将试管于室温保存，并按照说明包装您的样本

如有疑问，请通过以下方式联系我们：www.LifeLabs.com/COVIDkit

LifeLabs®

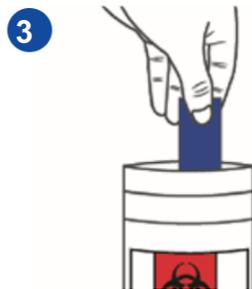
测试样本包装说明



1 确认您样本试管上的盖子是否拧紧。



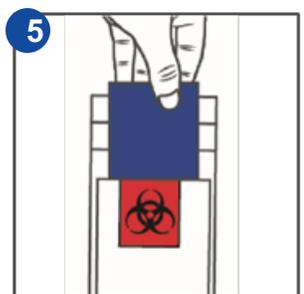
2 将盖紧的样本试管放入测试套装中的生物危险品袋中。



3 将吸水垫与您的样本试管一同放入袋子中。



4 放置好后，仔细密封生物危险品袋并确保其完全密封。



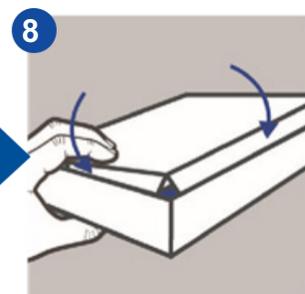
5 折叠您的纸质订单，并将其放入生物危害袋外部的口袋中。



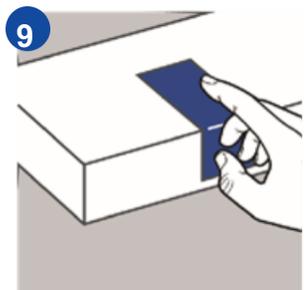
6 将生物危险袋放入铝箔袋内，并密封。



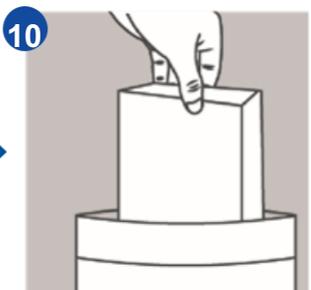
7 将铝箔袋放入您的测试套装盒中。



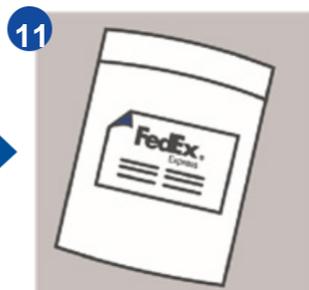
8 合上套装盒的盖子。



9 将防伪封条贴在盒子的前缘底部



10 将整个测试套装盒放入白色塑料袋中并密封。



11 将联邦快递的运输单贴在塑料袋上。



12 联邦快递上门取件联系电话为 1-800-463-3339。注意：您的上门取件套装不能投放在投放箱或联邦快递 (FASC) 的站点。