

A

Instrucciones para la recolección y manipulación de muestras

RECOLECCIÓN NASAL ANTERIOR BILATERAL/BUCAL COMBINADA


Las siguientes instrucciones de recolección están destinadas a ayudarle a recolectar su muestra nasal bilateral para la prueba COVID-19. Primero lea atentamente las instrucciones y luego siga cada paso para garantizar resultados precisos.

NOTA: Debe tener 16 años o más para realizar una muestra nasal bilateral auto-recolectada.


El uso de un espejo puede ayudarle a su recolección.




1 Lávese las manos con agua y jabón y séquelas bien.

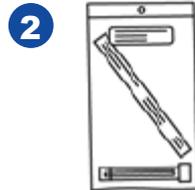


2 Obtenga el kit de recolección nasal anterior bilateral. Verifique que el tubo de recolección contenga líquido y que el mismo no esté visiblemente turbio.

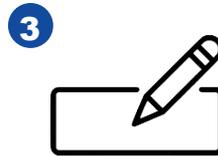


3 Escriba en la etiqueta su nombre completo, fecha de nacimiento y la fecha y hora de su recolección y luego péguela al tubo.

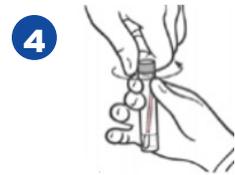


4 Desenrosque la tapa del tubo, colocándolo con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie plana o en la parte designada del kit. No derrame el contenido del tubo.

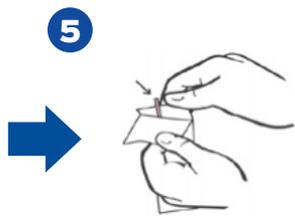

5 Sujete de los dos extremos del envoltorio del hisopo envuelto, y con cuidado despéguelo hacia abajo para exponer el mango. No desenvuelva completamente el hisopo.

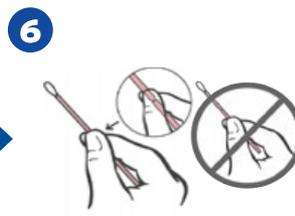


6 Retire el hisopo del paquete y sujételo de manera que esté pellizcando la línea marcada. Esto evitará la rotura accidental del hisopo durante la recolección.

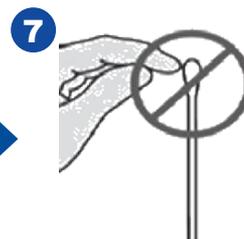

7 Para evitar la contaminación, asegúrese de que el hisopo no entre en contacto con su mano o cualquier superficie antes de la recolección. Si fuera contaminado, use un kit nuevo. Importante: NO moje ni humedezca previamente el hisopo antes de la recolección.




8 Inserte el hisopo entre la mejilla y las encías inferiores en un lado y gire el hisopo 3 veces para asegurarse de que esté humedecido. Repita en el otro lado.

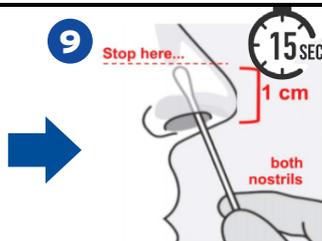

9 Inserte el hisopo 1 cm (0.5 plg) aprox. dentro de la fosa nasal. Gírelo firmemente alrededor de las superficies internas durante 15 segundos.




10 Con el mismo hisopo, repita en la otra fosa nasal. Gire el hisopo durante 15 segundos más.

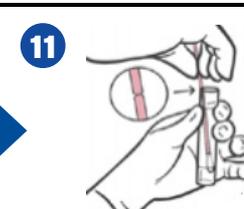


11 Coloque inmediatamente el hisopo en el tubo de transporte, de modo que la línea marcada quede nivelada con el borde superior del tubo.




12 Carefully break the shaft and allow the swab to drop to the bottom of the vial

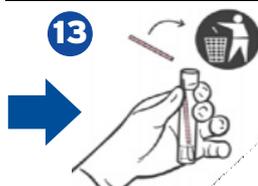


13 Deseche la parte superior del mango junto a la basura común.

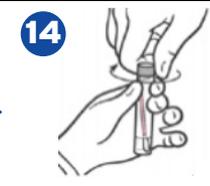

14 Enrosque la tapa del tubo de forma segura. Importante: Las muestras con pérdidas serán rechazadas por razones de seguridad y calidad.

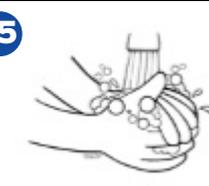


15 Lávese las manos con agua y jabón y séquelas bien.

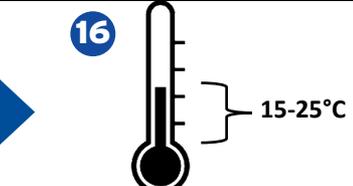

16 Guarde el tubo a temperatura ambiente y siga las instrucciones para empaquetarla.

Instrucciones para envasar su muestra

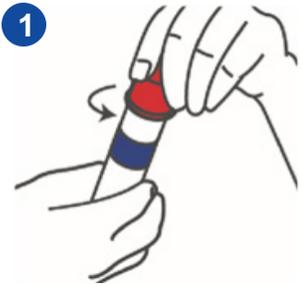

1 Compruebe que la tapa de su tubo de muestra esté bien enroscada.




2 Coloque el tubo de muestra bien tapado en la bolsa de riesgo biológico que se encuentra en su kit.




3 Coloque la almohadilla absorbente en la bolsa junto con su tubo de muestra.




4 Una vez colocada, selle con cuidado la bolsa de riesgo biológico y asegúrese de que esté completamente sellada.

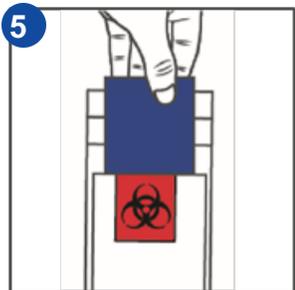


5 Doble su solicitud en papel y colóquela en el bolsillo exterior de la bolsa de riesgo biológico.

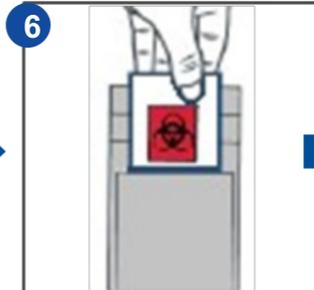


6 Coloque la bolsa dentro de la bolsa de aluminio y séllela.

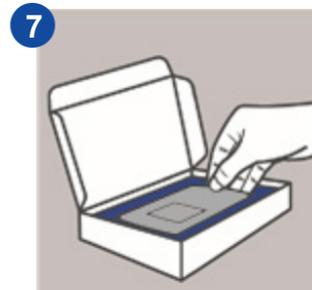


7 Coloque la bolsa de aluminio en la caja de su kit.

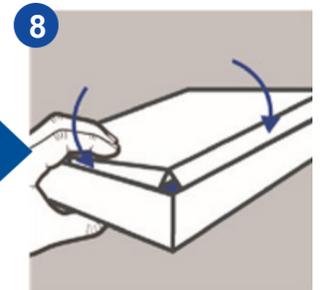

8 Cierre las solapas de la caja.

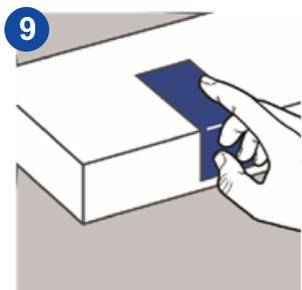

9 Coloque el sello a prueba de manipulaciones en el borde frontal inferior de la caja.

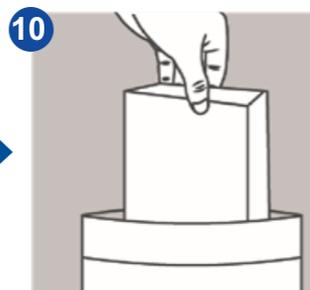

10 Coloque toda la caja del kit en la bolsa blanca de polietileno y séllela.



11 Coloque la etiqueta de envío de FedEx en la bolsa.



12 Comuníquese con FedEx al 1-800-GoFedEx para que la retiren. Nota: Su kit de recolección en el hogar no puede ser dejado en buzones ni en locales de FedEx (FASC).