

A

Hướng dẫn thu thập & xử lý mẫu vật


KẾ THẠP MẪU THỬ GIỮA MÁM MŨI Ở CẢ HAI BÊN

Các hướng dẫn thu thập sau đây nhằm giúp bạn lấy mẫu trong hai bên mũi cho xét nghiệm COVID-19. Đầu tiên hãy đọc kỹ hướng dẫn, sau đó làm theo từng bước để đảm bảo kết quả chính xác.


GHỊ CHÚ: Bạn phải từ 16 tuổi trở lên để tự thực hiện lấy mẫu trong hai mũi.
Việc sử dụng gương có thể hỗ trợ bạn trong việc lấy mẫu.




1 Rửa tay bằng xà phòng và nước và lau thật khô.

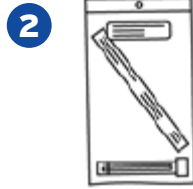


2 Lấy bộ dụng cụ lấy mẫu hai bên mũi. Đảm bảo rằng ống thu gom có chứa sẵn chất lỏng và chất lỏng không bị vỡ đục.

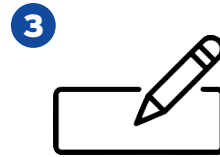


3 Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày giờ thu thập của bạn trên nhãn rồi dán vào ống.

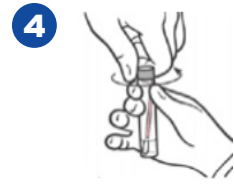


4 Vận mở nắp ống, đặt nghiêng ngay trên một bề mặt phẳng hoặc trong phần được chỉ định của bộ dụng cụ. Không làm tràn chất chứa trong ống.

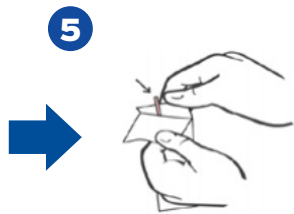

5 Nắm chặt hai đầu quai của túi tẩm bông đã bọc kín và từ từ bóc màng bọc xuống để lộ phần đầu tẩm bông. Không gỡ hoàn toàn gói tẩm bông ra.

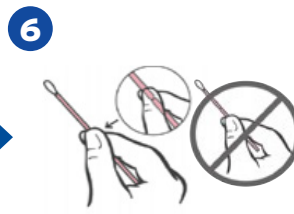


6 Lấy tẩm bông ra khỏi gói và cầm sao cho đúng vạch trên que tẩm. Điều này sẽ ngăn ngừa việc vô tình làm gãy tẩm bông trong quá trình thu thập.

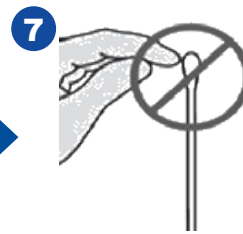


7 Để tránh nhiễm bẩn, hãy đảm bảo tẩm bông không tiếp xúc với tay của bạn hoặc bất kỳ bề mặt nào trước khi thu thập.


Nếu dụng cụ bị nhiễm bẩn, hãy sử dụng một bộ dụng cụ mới. Quan trọng: KHÔNG làm ẩm hoặc làm ướt tẩm bông trước khi thu thập

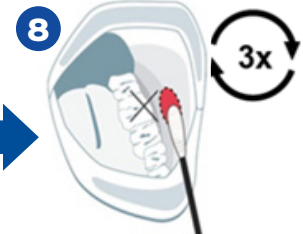


8 Đưa miếng gạt vào miệng, giữa má và nướu dưới ở một bên và xoay miếng gạt 3 lần để đảm bảo miếng gạt được ẩm. Lặp lại ở phía bên kia.

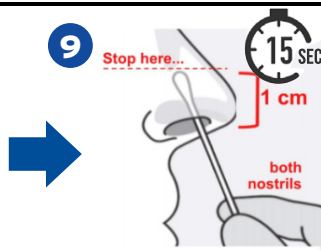


9 Cho tẩm bông vào bên trong lỗ mũi khoảng 1 cm (0,5 inch). Xoay tẩm bông quanh bề mặt bên trong của lỗ mũi trong 15 giây.

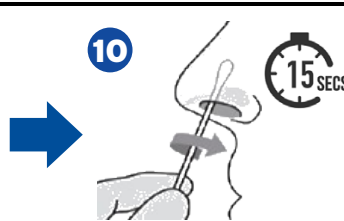


10 Sử dụng cùng một tẩm bông, lặp lại cho lỗ mũi còn lại. Xoay tẩm bông thêm 15 giây.

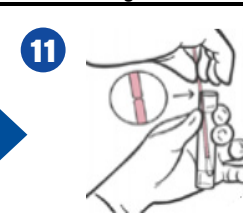


11 Đặt ngay tẩm bông vào ống vận chuyển sao cho vạch bé gãy ngang với mép trên của ống.

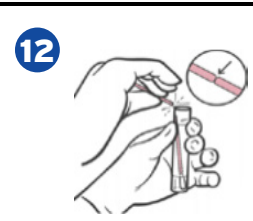

12 Cẩn thận bề que tẩm để phần kia rơi xuống đáy lọ vào trong chất lỏng.

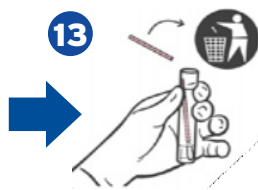


13 Bỏ phần trên của que tẩm vào thùng rác thông thường.

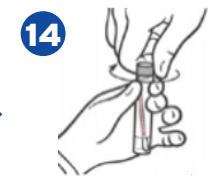

14 Vận chặt nắp ống một cách an toàn. Quan trọng: Các mẫu bị rò rỉ sẽ bị vứt chối vì lý do an toàn và chất lượng.



15 Rửa tay bằng xà phòng và nước và lau thật khô.

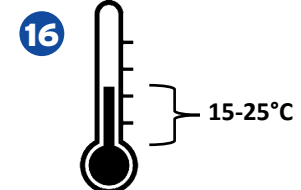

16 Bảo quản ống ở nhiệt độ phòng và làm theo hướng dẫn đóng gói mẫu của bạn.

Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại www.LifeLabs.com/COVIDkit